



# ACLOTTEST Fast

**ACLOTTEST® Fast** ist ein semiquantitativer Einwegtest zur Messung von Hausstaubmilbenallergenen (HMA) und zur Überprüfung der Effizienz von Allergenvermeidungsmaßnahmen.

HMA können Atemwegsprobleme, insbesondere Asthma, sowie Hautausschläge bei Personen mit Hausstaubmilbenallergie auslösen. HMA sind Exkreme der Hausstaubmilbe, einem mikroskopisch kleinen Organismus, der sich von Hautschuppen ernährt, die sich beispielsweise im Bett, auf Teppichen oder Polstermöbeln ansammeln.

## ZUSAMMENSETZUNG

**ACLOTTEST® Fast** enthält:

- (1) Eine Pipette
- (2) Einen Dosierlöffel aus Plastik
- (3) Eine Plastikröhre mit gefriergetrocknetem Reagens
- (4) Eine Testkarte mit rundem Fenster „S“ und ovalem Fenster markiert mit „T“ und „C“

## SAMMLUNG DER STAUBPROBE

Die Staubprobe kann auf zwei Arten gesammelt werden und sollte - falls möglich - von nicht-allergischen Personen durchgeführt werden:

1. Mit einem Staubsauger, unter Verwendung eines neuen Staubsacks; Saugen Sie die zu untersuchende Fläche (Matratzen, Polstermöbel, Polster, Teppiche) 2 Minuten lang ab.
2. Durch direkte Staubsammlung vom Boden mit einem Besen. Klopfen Sie vor der Sammlung die betreffenden Objekte (Bett, Polstermöbel, etc.) ordentlich durch.

Verwenden Sie nur die feinen Staubpartikel der Staubprobe für den Test und trennen Sie diese von den groben Fasern und Bröseln.

## DURCHFÜHRUNG DES TESTS

1. Geben Sie die Staubprobe mittels einem vollen Dosierlöffel (2) in das Teströhrchen (3).
2. Verschiessen Sie das Teströhrchen (3) und schütteln Sie es ca. 10 Sekunden.
3. Stellen Sie das Teströhrchen (3) in den Sockel (5) auf der Verpackungsrückseite und warten Sie 5 Minuten, danach das Teströhrchen (3) gut schütteln und wieder 5 Minuten warten.
4. Öffnen Sie das Teströhrchen (3) und entnehmen Sie etwas der Flüssigkeit mit der Pipette (1).
5. Geben Sie drei Tropfen in das runde Fenster „S“ auf der Karte (4) und warten Sie fünf Minuten. Das Testergebnis kann dann in dem ovalen Fenster „T“ und „C“ abgelesen werden:

➤ <b>Markierung „C“ (control)</b> Sollte hier keine rosa Linie erscheinen, so wurde der Test nicht korrekt ausgeführt!
➤ <b>Markierung „T“</b> <i>Keine Verfärbung:</i> Die Staubprobe enthielt kein Milbenallergen <i>Verfärbung leicht rosa:</i> Die HMA-Menge ist niedrig, geringes Risiko, Sanierungsmaßnahmen anzuraten. <i>Verfärbung stark rosa:</i> Die HMA-Menge ist hoch, hohes Risiko für Allergiker und Risiko-Gruppen, Sanierungsmaßnahmen unbedingt notwendig!

## HINWEISE

- **Nicht zur Einnahme geeignet!**
- **ACLOTTEST® Fast** ist ein Einwegtest zur ausschließlichen Bestimmung von Hausstaubmilbenallergenmengen (Gruppe 1 und 2 Milbenallergene) im Hausstaub.
- Die Aufbewahrung von **ACLOTTEST Fast™** sollte an einem trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und fern von Hitzequellen oder grellem Licht, erfolgen.