

resi® OPEP

PHZNR.: 5807517

Kliniktauglich



Autoklavierbares Atemphysiotherapiegerät

Das **resi® OPEP** ist ein kleines und autoklavierbares Atemtherapiegerät zur Lösung von zähem und festsitzendem Bronchialschleim mittels oszillierendem positivem Ausatemdruck (OPEP).

Das pfeifenförmige **resi® OPEP** bestehend aus einem Mundstück, einem Trichter, einer Edelstahlkugel und einem perforierten Kopfteil. Beim Ausatmen durch das **resi® OPEP** entstehen Schwingungen, welche die Ausatemluft und den Druck in den Bronchien - bis in die tiefsten Verzweigungen - in Vibration versetzen, sodass sich Schleim von den Bronchialwänden löst und besser Richtung Mund abtransportiert werden kann. Durch Kippen des Gerätes nach oben oder unten wird die Vibrationsfrequenz schneller oder langsamer.

Das **resi® OPEP** ist zur Anwendung bei Patienten mit obstruktiven Atemwegserkrankungen, wie chronischer Bronchitis, chronisch obstruktiver Bronchitis oder ähnlichen Beschwerden, gedacht. Das Gerät ist kliniktauglich und autoklavierbar. Alternativ kann das Gerät in der **FLAEM-Hygienebox** – die auch antimikrobiellen Schutz bietet (siehe Rückseite) – desinfiziert oder in der Mikrowelle (ausgenommen Stahlkugel) dampfsterilisiert werden.

Die Vorteile im Überblick

- ▶ Klein, kompakt und tragbar
- ▶ Löst festsitzenden, zähen Bronchialschleim
- ▶ Einfach und überall verwendbar
- ▶ Autoklavierbar und wiederverwendbar
- ▶ Geringe Behandlungskosten
- ▶ CE zertifiziert und MDR konform



CE

FLAEM HygieneBox

Dampfsterilisation
mit Mikrowelle

Desinfektions- und Aufbewahrungsbox mit antimikrobieller Veredelung

Oft ist die korrekte Desinfektion von Medizinprodukte-Zubehör sehr zeitaufwändig oder schwierig. Doch mit der **FLAEM Hygienebox** können kleinere Medizinprodukte und Babyartikel ab sofort einfach, schnell und hygienisch sicher dampfsterilisiert oder desinfiziert werden!

Die **FLAEM Hygienebox** ist geeignet für Mikrowellendesinfektion (**Dampfsterilisation** – ausgenommen Metallteile) oder zur Verwendung mit Desinfektionsmitteln. Die Box besteht aus einer Mischung aus Polypropylen und dem antimikrobiellen Zusatzstoff **BioCote®** – einem dauerhaften Schutz vor Bakterien, Pilzbefall und Viren. Sie kann daher nach dem Desinfektionsvorgang auch gleich als Aufbewahrungsbox verwendet werden.

Die **FLAEM Hygienebox** eignet sich besonders gut für Inhalationszubehör wie Vernebler, Mundstücke oder Masken aber auch für andere kleinere Medizinprodukte und Babyartikel (Schnuller, Beißringe, etc.).

Die Vorteile im Überblick

- ▶ **Dampfsterilisation** in der Mikrowelle in ein paar Minuten mit nur 100ml Wasser
- ▶ **Desinfektion** mit Desinfektionsmitteln
- ▶ **Antimikrobielle** Aufbewahrungsbox
- ▶ Passend für Verneblerzubehörteile und andere Produkte (**resl® OPEP**, Schnuller, Nasenduschen, Beißringe, etc.)
- ▶ Maße: 19,5 x 14,5 x 9,5 cm



Ihr Fachhändler

