

Wir von Baby's Breach danken Ihnen, dass Sie sich für Baby Air entschieden haben, das einzigartige Inhalationssystem für Babys bis 2 Jahre. Das System ermöglicht die Zufuhr von Medikamenten zu Ihrem Baby auch im Schlaf – wirkungsvoll, sicher und einfach. Das System kommt mit Ihrem Kind nicht in Berührung und beugt so einem Gefühl des Unwohlseins vor, das bei der üblichen heutigen Verabreichung von Medikamenten über Gesichtsmaskte entsteht.

WICHTIG

- Bitte vor Inbetriebnahme von Baby Air die Benutzeranleitung komplett durchlesen.
- Baby Air darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden.
- Baby Air enthält Kleinteile. Halten Sie Kinder von Kleinteilen des zerlegten Gerätes fern.
- Baby Air darf nur zur aerosolen Zufuhr ärztlich verschriebener Inhalationsmedikamente verwendet werden.
- Es dürfen keine Teile verändert, keine nicht mitgelieferten Teile hinzugefügt oder minderwertige Teile verwendet werden
- Baby Air nicht verwenden, wenn es beschädigt ist oder Teile davon nicht ordnungsgemäß funktionieren.
- Baby Air ist für die Verwendung bei nur einem Patienten vorgesehen. Auf Grund des Ansteckungs - und Entzündungsrisikos darf das System nicht von einem Patienten auf einen anderen übertragen werden.
- Nur den von Baby Air erworbenen Kompressor oder einen Kompressor mit identischen technischen Angaben verwenden.



Bei Fragen wenden Sie sich bitte
an Baby's Breath unter: 972-4-6262551
Unsere E-Mail-Adresse lautet: info@bbreath.com
Für weitere Produktinformationen,
besuchen Sie bitte unsere Website unter:
www.bbreath.com



Postfach 42, Industriegebiet Nord, 30600 Or Akiva, Tel: 972-4-6262551

BabyAir™



Benutzerhandbuch

Betrieb

Die folgenden Anweisungen erläutern Ihnen den Betrieb von Baby Air:

1. Den Zerstäuber durch die obere Öffnung in die Haube einführen.
2. Die Kappe 5 mit dem Verbindungsteil durch eine spiralförmige Bewegung von der Basis des Zylinders entfernen.
3. Den Hohlraum in der Hülse 7 mit der genauen vom Arzt verschriebenen Dosis des flüssigen Medikaments füllen.
4. Kappe und Hülse bis zur vollkommenen Abdichtung wieder aufschrauben.
5. Den Luftschlauch des Kompressors 4 an die Kappe anschließen.
6. Die Haube so über den Kopf des Säuglings stellen, dass die Flügel auf dem Körper des Säuglings anliegen.
7. Den Silikonschnabel in Nähe von Nase und Mund des Säuglings platzieren (empfohlener Abstand etwa 2 cm).
8. Den Kompressor starten, bis das Medikament komplett verabreicht wurde.
Zum Beispiel: 2 cc Medikament = etwa 10 Minuten Betrieb.
9. Nach Abschluss des Vorgangs Kompressor ausschalten, die Haube vom Säugling abheben und das System auf den nächsten Gebrauch vorbereiten (siehe Anleitung **Reinigung und Montage**).

Einfüllen des Medikaments



Reinigung und Montage

Die folgenden Schritte müssen vor der ersten und nach jeder Benutzung des Baby Air ausgeführt werden.

Der Zerstäuber

- a) Den Zerstäuber aus der Haube entfernen.
- b) Die Kappe 5 durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn entfernen.
- c) Verbindungsteil 6 durch Abziehen von der Kappe 5 entfernen.
- d) Die Hülse 7 durch Abziehen vom Hauptteil 8 entfernen.
- e) Den Silikonschnabel 9 durch Abziehen vom Hauptteil 8 entfernen.

Nachdem das System auseinander genommen wurde, alle Teile mit Seife und heißem Wasser reinigen. Dazu darf nur ein weicher Schwamm verwendet werden. In sauberem Wasser gründlich spülen und zum Trocknen auf ein Handtuch ablegen.

Nachdem alle Teile getrocknet sind wird der Zerstäuber in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengesetzt, wie folgt:

- a) Den Silikonschnabel 9 in das Hauptteil 8 einsetzen.
 - b) Die Hülse 7 in das Hauptteil 8 einsetzen. Es ist sicherzustellen, dass die zwei kleinen Vorsprünge am Boden der Hülse in den Schlitz an der Spitze des Hauptteils sitzen.
 - c) Das Verbindungsteil 6 mit der Öffnung nach unten in die Hülse 7 einsetzen.
 - d) Die Kappe 5 im Uhrzeigersinn auf das Verbindungsteil 6 aufschrauben.
- Der Zerstäuber ist nun betriebsbereit.

Die Haube

Die Haube an der Spitze halten und ein Bein anheben bis es einrastet (es ertönt ein Klicken). Diesen Vorgang bei allen Beinen wiederholen.
Das Kunststoffgehäuse ausschließlich mit feuchtem Tuch reinigen.
Für bequeme Lagerung der Haube nach Gebrauch, die Haube an der Spitze halten und die Beine nach innen falten.

Teile

Baby Air besteht aus drei Hauptbestandteilen:

- **Transparente Haube** – Ein transparenter Kunststoffüberzug über eine Kunststoffbasis gespannt, mit gerichtetem Zylinder
- **Gerichteter Zylinder** – Dieser einzigartige Zerstäuber wandelt flüssige Medikamente in ein Aerosol, das oben und an den Seiten austritt, und sorgt dafür, dass es nah an Nase und Mund des Säuglings vorbeifließt und inhaliert wird.
- **Kompressor** – Ist nicht Teil des Pakets und muss getrennt erworben werden



* Wird nur mit Kompressor geliefert

Die Haube

- 1 Beine
- 2 Transparentes Kunststoffgehäuse
- 3 Öffnung

Der Zerstäuber

- 4 Luftschlauch
- 5 Kappe
- 6 Zwischenteil
- 7 Hülse
- 8 Hauptteil
- 9 Silikonschnabel

