

ACb™-Überzüge


Mehr als 15 mal weltweit klinisch getestet!

Herzlichen Glückwunsch...

...zu Ihrer Entscheidung für einen **ACb™-Überzug**. Sie haben damit ein Produkt von ausserordentlich hoher Qualität erstanden. Bei richtiger Behandlung wird es Ihnen viele Jahre lang dienen und Sie vor Allergenen schützen. Um Sie bei der Anwendung zu unterstützen, möchten wir Ihnen einige Hinweise für den richtigen Gebrauch geben.

So verwenden Sie Ihren ACb™-Überzug:

Umhüllen Sie Ihre Matratze, Tuent bzw. Ihren Polster mit dem **ACb™-Überzug** und schliessen Sie den Reissverschluss. Überziehen Sie anschliessend Ihre übliche Bettwäsche (s. nebenstehende Skizze).

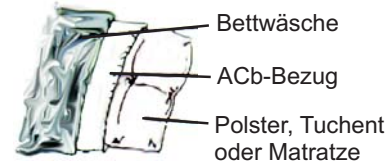

So pflegen Sie Ihren ACb™-Überzug:

Saugen Sie beim Wechseln der Bettwäsche die Oberfläche des **ACb™-Überzuges** ab (Achtung: Hausstaubmilben-Allergiker sollten dabei unbedingt einen speziellen HEPA-Staubsauger verwenden oder eine Schutzmaske tragen). **ACb™-Überzüge** können mit geöffnetem Reissverschluss in der Waschmaschine bei 60°C gewaschen werden (Achtung: nicht schleudern!). Hausstaubmilben-Allergikern mit Neurodermitis empfehlen wir die Überzüge alle 3 Monate zu waschen, Personen mit Asthma oder allergischer Rhinitis alle 6 Monate. Lassen Sie **ACb™-Überzüge** nach dem Waschen ausreichend trocknen (Trocknen im Wäschetrockner ist bei niedrigster Temperatur möglich) und verwenden Sie sie erst wieder, wenn sie vollständig trocken sind. Achtung: Nicht bügeln!