



ACb™-Überzüge


Mehr als 20 mal weltweit klinisch getestet!

Herzlichen Glückwunsch...

...zu Ihrer Entscheidung für einen **ACb™-Überzug**. Sie haben damit ein Produkt von außerordentlich hoher Qualität erstanden. Bei richtiger Behandlung wird es Sie viele Jahre lang vor Allergenen schützen. **ACb™-Überzüge** haben sich in zahlreichen Studien als exzellente Allergenbarriere bewährt. Um Sie bei der Anwendung zu unterstützen, möchten wir Ihnen einige Hinweise für den richtigen Gebrauch geben.

So verwenden Sie Ihren ACb™-Überzug:

Umhüllen Sie Ihre Matratze, Tuchent bzw. Ihren Polster mit dem **ACb™-Überzug** und schließen Sie den Reißverschluss. Darüber verwenden Sie Ihre herkömmliche Bettwäsche (siehe nebenstehende Skizze), die wöchentlich gewaschen werden sollte.

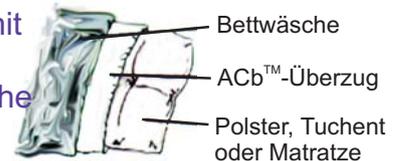

Beim jedem Wechsel der Bettwäsche sollte der **ACb™-Überzug** der Matratze mit einem feuchten Tuch abgewischt werden, um angesammelte Staubpartikel zu entfernen (Allergiker sollten dabei eine Schutzmaske tragen). Bei mehreren Betten im Raum sollten immer alle Betten überzogen werden.

So pflegen Sie Ihren ACb™-Überzug:

Hausstaubmilben-Allergikern mit Neurodermitis empfehlen wir die **ACb™-Überzüge** alle 3 Monate, Personen mit Asthma oder allergischer Rhinitis alle 6 Monate zu waschen. ACHTUNG: Allergiker sollten auch beim Abziehen der Überzüge eine Schutzmaske tragen! Waschen Sie Ihre **ACb™-Überzüge** mit geöffnetem Reißverschluss in der Waschmaschine bei 60°C. Verwenden Sie ein handelsübliches Waschmittel ohne Bleichzusatz (dieser kann die Schutzfunktion des **ACb™-Überzuges** beeinträchtigen).

WICHTIG: Nicht entschleudern (bei Spülstopp aus der Waschmaschine nehmen) und nicht bügeln!

Lassen Sie die **ACb™-Überzüge** nach dem Waschen ausreichend trocknen - Trocknung im Wäschetrockner nur bei niedrigster Stufe (max. 60°C). Verwenden Sie die **ACb™-Überzüge** erst wieder, wenn sie vollständig trocken sind.

Ganz wesentlich für eine langfristig anhaltende Besserung der Beschwerden ist eine konsequente und umfassende Allergensanierung. Fragen Sie Ihren Arzt oder medizinischen Fachhändler nach der Broschüre "Allergenvermeidung richtig gemacht!", um mehr über weitere wichtige Maßnahmen zu erfahren!