

Leicht, platzsparend & atmungsaktiv
mit maximalem Schutz

geeignet für Kinder 5-7 Jahre

Einzigartige Eigenschaften:

Die Nanofaser-Membran bietet noch höheren Schutz vor einer Ansteckung mit Keimen als herkömmliche Elektretfilter-Masken.

Mehrfach verwendbar

Bei sachgemäßer Handhabung besteht mehrtägiger Schutz vor Mikroorganismen. Die Schutzmaske kann mit einem Desinfektionsmittel auf Alkohol- oder Isopropanolbasis behandelt und wiederaufbereitet werden.

Optimale Anpassung

Nasenclip und Dichtung sorgen für eine perfekte Abdichtung im Nasenbereich.

Leicht und platzsparend

Mit einem Gewicht von nur 4g sitzt diese Maske viel bequemer als herkömmliche Elektretfilter-Masken. Das geringe Gewicht erleichtert die Atmung enorm.

Atmungsaktiver Tragekomfort

Sie passt sich jeder Gesichtsform an und sitzt perfekt.



Hinweise zur Verwendung

1. Waschen Sie ihre Hände.
 2. Nehmen Sie die Atemschutzmaske aus der Verpackung und kontrollieren Sie diese auf sichtbare Mängel. Wenn Sie eine Beschädigung erkennen oder ein Teil (Nasenclip, Gummiband) fehlt, sie eine farbliche Veränderung oder eine sonstige Beschädigung feststellen – verwenden Sie die Atemschutzmaske nicht.
 3. Legen Sie die Atemschutzmaske an Ihr Gesicht an und ziehen Sie das Gummiband vorsichtig über die Ohren.
 4. Drücken Sie den Nasenclip an, das verbessert die Abdichtung der Atemschutzmaske im Nasenbereich.
 5. Kontrollieren Sie die Abdichtung der Atemschutzmaske: Atmen Sie tief ein. Wenn Sie feststellen, dass zwischen der Atemschutzmaske und Ihrem Gesicht Luft durchzieht, kann dies wie folgt verbessert werden:
 - ändern Sie vorsichtig die Position der Atemschutzmaske an Ihrem Gesicht;
 - formen Sie den Nasenclip nach.
- Verwenden Sie die Atemschutzmaske nicht, wenn schädliche Partikel in die Atemschutzmaske eingedrungen sind und eine Verunreinigung, ein Geruch oder ein anderes Anzeichen für das Eindringen schädlicher Partikel festgestellt wurde oder der Atemwiderstand erheblich gestiegen ist.



www.menzl.com



T: +43 (0) 1 255 89 60 - 0
E: info@menzl.com



Portheimgasse 14
A- 1220 Wien
Österreich



NANO4FIBERS
FACTORY s.r.o.
Žitkova 2759
13 01 Roudnice n/L
Česká republika
www.nano4fibers.com