

Trainhaler® Buddy - App

Gratis für
Android & iOS

Der digitale Inhalationscoach

Trainhaler® Buddy ist eine neue, innovative App, mit deren Hilfe Patienten einfach und schnell die optimale Inhalationstechnik mit Dosieraerosolen lernen können.

Für Betrieb benötigt **Trainhaler® Buddy** eine der auf der Rückseite dieses Flyers abgebildeten Coaching-Pfeifen: **Flo-Tone®**, **Flo-Tone® CR** oder die Whistle-Masken für den **ABLE-Spacer 2**. All diese Coaching-Pfeifen erzeugen ein akustisches Signal, das von **Trainhaler® Buddy** erkannt und verarbeitet wird.


Sobald man das Inhalationsmanöver in der richtigen Geschwindigkeit durchführt, visualisiert **Trainhaler® Buddy** die Länge des Inhalationsvorgangs auf einer Skala von 0 bis 8 Sekunden. Ziel ist, auf der Skala möglichst weit nach oben zu kommen, also mit Hilfe des optischen Feedbacks ein möglichst langsames und langes Inhalationsmanöver für eine bestmögliche Verteilung des Medikamentenwirkstoffes in der Lunge durchzuführen.

Die **Trainhaler® Buddy** App ist gratis erhältlich und kann im Play-Store für Android- oder im App-Store für iOS-basierende Geräte heruntergeladen werden.

Die Vorteile auf einem Blick

- ▶ Einfaches Erlernen des richtigen Inhalationsmanövers
- ▶ Übersichtlich gestaltet
- ▶ Ansprechend und motivierend dargestellt
- ▶ Gratis für Android und iOS

Download

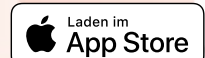

Trainhaler® und Flo-Tone® Trainings- und Inhalationshilfen

Trainhaler® und **Trainhaler® CR** sind einem Dosieraerosol nachempfundene Trainingsgeräte zum Erlernen der richtigen Inhalationstechnik, enthalten jedoch keine Wirkstoffe und vernebeln auch kein Aerosol. **Trainhaler®** und **Trainhaler® CR** benötigen zum Betrieb die **Flo-Tone®** oder **Flo-Tone® CR** Coaching-Pfeifen.

Diese werden auf den Trainhaler aufgesetzt und erzeugen einen Ton, sobald der Patient mit dem richtigen inspiratorischen Flow inhaliert und den Sprühstoß auslösen kann. Danach sollte mit der gleichen langsamen Geschwindigkeit weiterinhaliert werden.

Flo-Tone® oder **Flo-Tone® CR** können als Einpatientenprodukte ausgegeben und später von den Patienten mit ihren eigenen Dosieraerosolen verwendet werden. **Flo-Tone®** kann zu Trainings-Zwecken mit dem Trainhaler verwendet werden und passt danach auch auf den **ABLE-Spacer 2** sowie viele Dosieraerosole.

Flo-Tone® CR kann sowohl mit dem Trainhaler, als auch dem **Trainhaler® CR** verwendet werden. Es passt sowohl auf den **ABLE-Spacer 2**, als auch auf andere Vorschaltkammern und fast alle am Markt befindlichen Dosieraerosole.

Mit **Flo-Tone®** und **Flo-Tone® CR** wird im Unterschied zu anderen am Markt befindlichen akustischen Trainingshilfen sichergestellt, dass der Pfeifton bei allen Dosieraerosolen bei der gleichen langsamen Flussrate anspricht, unabhängig vom individuellen Widerstand der einzelnen Dosieraerosole.

Trainhaler® CR



Flo-Tone® CR



Trainhaler® mit
Flo-Tone®



PHZNR auf einem Blick

Flo-Tone®: 41 41 536

Flo-Tone® CR: 44 83 656

Able Spacer 2 + Maske L: 46 09 672

Able Spacer 2 + Maske M: 46 09 666

Able Spacer 2 + Maske S: 46 09 643

Infotelefon:
01 / 255 89 600

