

# Trainhaler® und Flo-Tone® Trainings- und Inhalationshilfen

**Trainhaler®** und **Trainhaler® CR** sind einem Dosieraerosol nachempfundene Trainingsgeräte zum Erlernen der richtigen Inhalationstechnik, enthalten jedoch keine Wirkstoffe und vernebeln auch kein Aerosol. **Trainhaler®** und **Trainhaler® CR** benötigen zum Betrieb die **Flo-Tone®** oder **Flo-Tone® CR** Coaching-Pfeifen.

Diese werden auf den Trainhaler aufgesetzt und erzeugen einen Ton, sobald der Patient mit dem richtigen inspiratorischen Flow inhaliert und den Sprühstoß auslösen kann. Danach sollte mit der gleichen langsamen Geschwindigkeit weiterinhaliert werden.

**Flo-Tone®** oder **Flo-Tone® CR** können als Einpatientenprodukte ausgegeben und später von den Patienten mit ihren eigenen Dosieraerosolen verwendet werden. **Flo-Tone®** kann zu Trainings-Zwecken mit dem Trainhaler verwendet werden und passt danach auch auf den **ABLE-Spacer 2** sowie viele Dosieraerosole.

**Flo-Tone® CR** kann sowohl mit dem Trainhaler, als auch dem **Trainhaler® CR** verwendet werden. Es passt sowohl auf den **ABLE-Spacer 2**, als auch auf andere Vorschaltkammern und fast alle am Markt befindlichen Dosieraerosole.

Mit **Flo-Tone®** und **Flo-Tone® CR** wird im Unterschied zu anderen am Markt befindlichen akustischen Trainingshilfen sichergestellt, dass der Pfeifton bei allen Dosieraerosolen bei der gleichen langsamen Flussrate anspricht, unabhängig vom individuellen Widerstand der einzelnen Dosieraerosole.

Trainhaler® CR



Flo-Tone® CR



Trainhaler® mit  
Flo-Tone®



## PHZNR auf einem Blick

*Flo-Tone®*: 41 41 536

*Flo-Tone® CR*: 44 83 656

*Able Spacer 2 + Maske L*: 46 09 672

*Able Spacer 2 + Maske M*: 46 09 666

*Able Spacer 2 + Maske S*: 46 09 643

Infotelefon:  
01 / 255 89 600

