

## Tabletts und Norm-Tray-Kassetten

Hersteller/Lieferant: MELAG Medizintechnik oHG, Geneststraße 6 - 10, D - 10829 Berlin



Tablett



Norm-Tray-Kassette

Produktbezeichnung	Art.-Nr.
Tablett für Vacuklav <sup>®</sup> 23 B+, 24 B+, 43 B+, 44 B+	00230
Tablett für Vacuklav <sup>®</sup> 24 B/L+	00246
Tablett für Vacuklav <sup>®</sup> 30 B+, 31 B+, 40 B+, 41 B+	00280
Norm-Tray-Kassette, gelocht ohne Filter	00286
Norm-Tray-Kassette, gelocht mit Filter	00289

### Produktbeschreibung

Die Aluminium-Tabletts und Norm-Tray-Kassetten sind ein mehrfach verwendbares System zur Organisation, Lagerung und Sterilisation von Instrumenten und Medizinprodukten.

### Anwendungsgebiet

- Dampfsterilisation (134°C)
- Heißluftsterilisation (180°C)\*

\* Ausnahme: Im Heißluftsterilisator dürfen keine Norm-Tray-Kassetten mit Filter verwendet werden



#### **ACHTUNG<sup>®</sup>**

Die Tabletts und Norm-Tray-Kassetten sind nicht für die Verwendung in einem Ultraschallbad, Reinigungs- und Desinfektionsgerät oder Geschirrspüler geeignet!

### Lagerung

Lagern Sie die Tabletts und Norm-Tray-Kassetten unter sauberen und trockenen Bedingungen.

## Reinigung und Pflege

### Manuelle Reinigung:

- Verwenden Sie zur Reinigung, Desinfektion und Pflege nur pH-neutrale Mittel mit einem pH-Bereich zwischen 4 und 8.
- Zur Vermeidung von Rückständen oder Flecken wird eine Schlusspülung mit vollentsalztem Wasser empfohlen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Reinigungsmittelrückstände restlos beseitigt sind.
- Trocknen Sie die Teile nach einer Reinigung/Desinfektion vollständig.
- Lagern Sie die Tablettts und Norm-Tray-Kassetten trocken.

### Maschinelle Aufbereitung:

- nicht empfohlen



### ACHTUNG

Durch unsachgemäße Reinigung und Desinfektion besteht die Gefahr von Korrosion und Spannungsrissen.

**Die Eloxal-Schicht kann durch Kontakt mit einigen chemischen Reinigungsmitteln beschädigt werden.**

- Die Oberfläche darf nicht mit spitzen oder scharfkantigen Gegenständen beschädigt werden.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel (Pulver) oder kratzende Metallbürsten o.ä.
- Achten Sie bei der Wahl der Reinigungs-/Desinfektionsmittel entsprechend auf Aluminiumverträglichkeit.

## Material

- Eloxiertes Aluminium
- Aluminium: EN AW 5005

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Abmaße (L x B x H in cm)
Tablett für Vacuklav <sup>®</sup> 23 B+, 24 B+, 43 B+, 44 B+	41,9 x 18,8 x 2,2
Tablett für Vacuklav <sup>®</sup> 24 B/L+	54 x 18,6 x 2
Tablett für Vacuklav <sup>®</sup> 30 B+, 31 B+, 40 B+, 41 B+	28,8 x 18,8 x 2,2
Norm-Tray-Kassette, gelocht ohne Filter	29 x 19 x 4,0
Norm-Tray-Kassette, gelocht mit Filter	29 x 19 x 4,0