


# MELAflash

## CF-Card-Schreiber

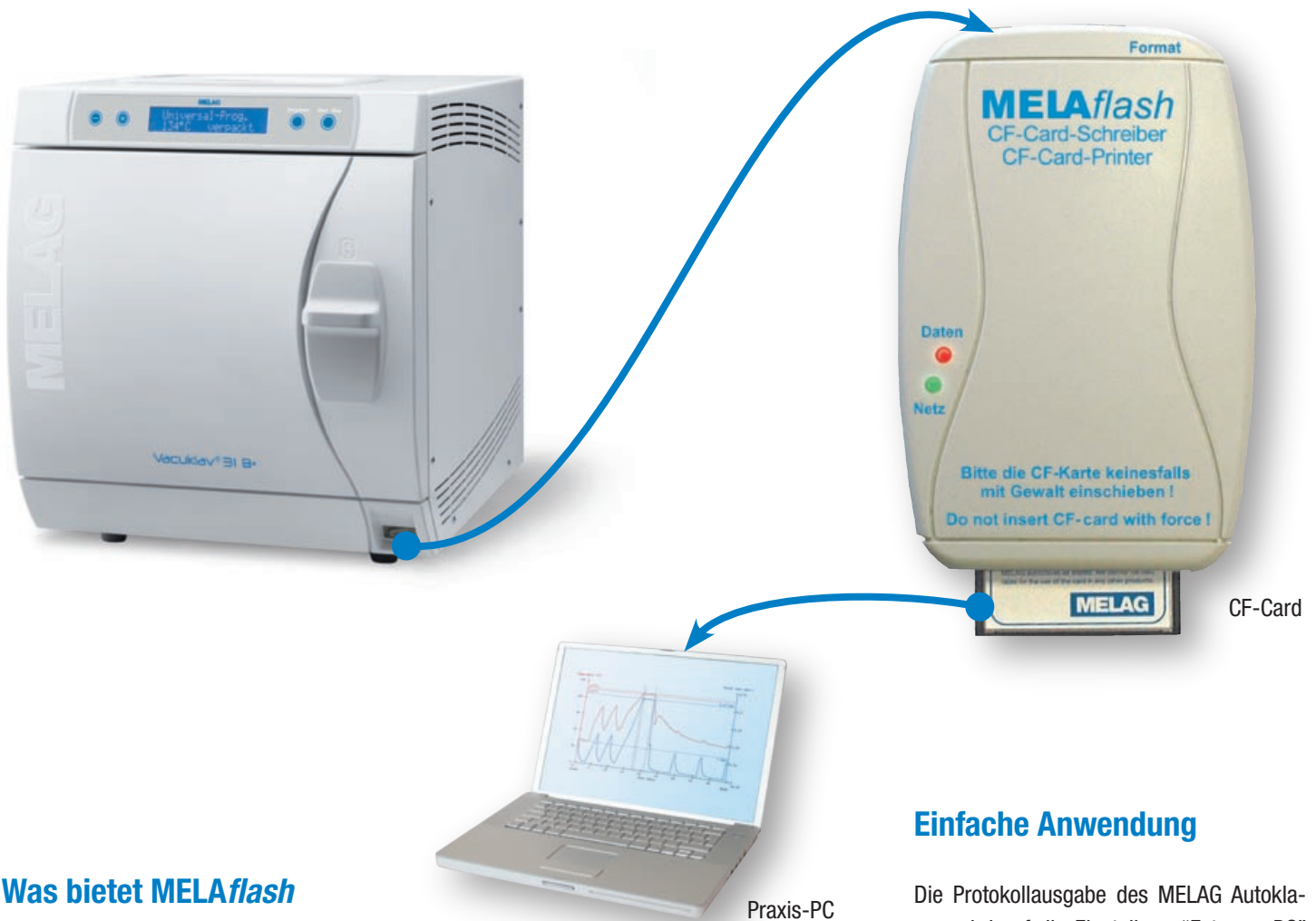

### Was bietet MELAflash

Das MELAflash-System besteht aus dem CF-Card-Schreiber, der MELAflash CF-Card und dem MELAflash Kartenlesegerät.

Mit diesen 3 Komponenten wird die Dokumentation für die bewährten MELAG Autoklaven der Profi-Klasse, der S-Klasse, dem Kliniklav®25 und für die MELAtronic®EN deutlich vereinfacht und komfortabler. Ohne weitere Anbindung des Autoklaven an das Praxis-Netzwerk oder dem Anschluss eines externen Druckers können die Sterilisationsprotokolle sehr einfach auf einem PC abgespeichert werden. So erfüllen Sie die Forderung nach einer dauerhaften Reproduzierbarkeit der erfolgreichen Sterilisation in Ihrer Praxis.

### Abspeichern und Anzeigen der Daten

Nach dem Übertragen der Daten über das mitgelieferte MELAflash Kartenlesegerät auf den Praxis-PC können die Protokolle mit jedem Textverarbeitungsprogramm oder jeder Tabellenkalkulation betrachtet, mit Bemerkungen ergänzt oder auf einem am PC angeschlossenen Drucker ausgedruckt werden.

Als komfortablere Alternative bietet MELAG die Dokumentations-Software MELAview.

### Einfache Anwendung

Die Protokollausgabe des MELAG Autoklaven wird auf die Einstellung "Externer PC" eingestellt.

Ist der MELAflash CF-Card-Schreiber an der seriellen Schnittstelle des Autoklaven angeschlossen, werden die Daten der Sterilisation automatisch auf die MELAflash CF-Card gespeichert.

### Lieferumfang

Im Lieferumfang des MELAflash CF-Card-Schreibers ist zusätzlich die MELAflash CF-Card sowie das MELAflash Kartenlesegerät enthalten.

Abmessungen:

Breite: 7,5cm x Tiefe: 11,5cm x Höhe: 2,5cm.