



Therapie, der Sie vertrauen können

InnoSpire Deluxe – Kompressor-Verneblersystem

Das Kompressor-Verneblersystem InnoSpire Deluxe ist zuverlässig, einfach anzuwenden und eignet sich für die Vernebelung der meisten bei respiratorischen Krankheiten verordneten Aerosolmedikamente.

Der InnoSpire Deluxe gehört zu unserer InnoSpire Familie von Kompressor-Verneblersystemen für die zuverlässige Versorgung mit Medikamenten.

Der InnoSpire Deluxe eignet sich sowohl für professionelle Anwendungen im klinischen Umfeld als auch für die regelmäßige Anwendung bei der Versorgung zu Hause.

Bewährte Verneblertechnologie

Verbunden mit dem wiederverwendbaren SideStream oder dem SideStream Plus Vernebler bietet der InnoSpire Deluxe eine hocheffiziente Aerosol-Therapie mit einer kurzen Behandlungszeit.

Wichtigste Merkmale

- Passend für den wiederverwendbaren SideStream oder SideStream Plus
- 7 l/min Flussrate
- Kontinuierlicher Flow für Dauerbetrieb
- Großes, internes Fach für Zubehör
- Tragegriff für einfaches Transportieren

PHILIPS
RESPIRONICS

Zuverlässige Aerosolabgabe

Der wiederverwendbare SideStream sowie der SideStream Plus wurden so konstruiert, dass sie über ein aktives Venturi-System mehr Luft ansaugen, was zu einer schnelleren Arzneimittelabgabe und kürzeren Behandlungszeiten führt.

Darüber hinaus verfügen sie über eine einzigartige Diamantdüse, durch die der Verschleiß durch häufigen Gebrauch auf ein Mindestmaß reduziert und konstant hochwertiges Aerosol abgegeben wird.



Wiederverwendbarer SideStream Vernebler


Mithilfe des Venturi produziert der SideStream eine Flussrate von 16 l/min



Innovative Diamantdüse für gleichbleibendes Aerosol von hervorragender Qualität

SideStream Plus

Das Ausatemventil öffnet sich bei der Einatmung, um das Medikament mit einem effektiven Ausstoß abzugeben und schließt sich, wenn der Patient ausatmet, um das Medikament zu sichern und somit einen Verlust des Medikaments zu vermeiden.

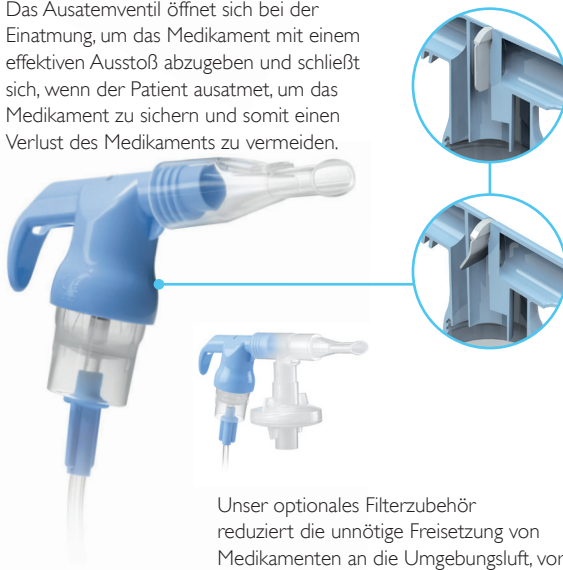

Unser optionales Filterzubehör reduziert die unnötige Freisetzung von Medikamenten an die Umgebungsluft, vor allem bei der Verneblung von Antibiotika.

Spezifikationen	Vernebler	
Leistungsdaten	SideStream Plus	wiederverwendbarer SideStream
MMAD	3,42 µm	2,93 µm
Feinpartikelfraktion	67 %	76,3 %
Behandlungszeit (2,5 ml flüssiges Medikament)	3,68 min	4,12 min
Produktspezifikationen	InnoSpire Deluxe	
Stromversorgung	230 V/50 Hz, 1 Amp	
Max. Kompressordruck	360 kPa (3,6 bar)	
Durchschnittliche Flussrate	7 l/min bei 10 PSI (ca. 0,7 bar)	
Max. Flussrate	9,8 l/min	
Temperaturwächter	Thermische Sicherung, Funktionstemperatur 150 °C	
Größe	38 x 17 x 11 cm	
Gewicht	2,2 kg	
Geräuschpegel	58 ± 3 dBA	
Betriebstemperatur/Feuchtigkeit	10 °C bis 40 °C / 10 % bis 95 % nicht kondensierend	

Bestellinformationen	Artikelnr.
Kompressor-Verneblersysteme – mit SideStream Plus Kit	
InnoSpire Deluxe – 230V/50 Hz – EU-Stecker	1110057
Kompressor-Verneblersysteme – mit wiederverwendbarem SideStream Kit	
InnoSpire Deluxe – 230V/50 Hz – EU-Stecker	1112278
Zubehör/Ersatzteile	
SideStream Plus, wiederverwendbar (enthält Vernebler, Schlauch und Mundstück)	1092001
SideStream, wiederverwendbar, Jahrespackung (enthält Vernebler, Schlauch, Mundstück, Maske für Kinder, Maske für Erwachsene)	2010A
SideStream, wiederverwendbares Kit mit Maske für Erwachsene	1223A
SideStream, wiederverwendbares Kit mit Maske für Kinder	1224A
SideStream, wiederverwendbares Kit mit Mundstück	1225A
Lufteinlassfilter (Packung mit 4 Stück)	1113525

Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.de/respironics



© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern oder die Herstellung zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung oder Verpflichtung einzustellen, und haftet nicht für eventuelle Folgen der Verwendung dieser Broschüre.

Broudy AM 4/xx/14 MCI 4105982 PN 1114853

Philips Healthcare ist ein Unternehmen der Royal Philips

Philips Respironics Deutschland
+49 8152 93 06 0
Philips Respironics Frankreich
+33 2 51 89 36 00
Philips Respironics Schweiz
+41 6 27 45 17 50

Respironics Respiratory Drug Delivery (UK) Ltd
Chichester Business Park, City Fields Way
Tangmere, Chichester P020 2FT
Vereinigtes Königreich
Kundendienst
+1 724 387 4000