

PHILIPS
RESPIRONICS

PersonalBest



Optimale Selbstkontrolle Ihrer Lungenfunktionalität

Peak Flow Meter PersonalBest

Peak Flow Meter zum universellen Einsatz mit integriertem Dreizonen-Asthma-Management-System.



Leichte und einfache Messungen

Die farbkodierten Zeiger geben drei Zonen an und erleichtern es dem Anwender so festzustellen, welchen Prozentsatz seines Spitzenflusses er gerade erreicht.

Benutzerfreundliche Eigenschaften

PersonalBest ist einfach anzuwenden und lässt sich schnell verstauen. Der ausklappbare Griff erleichtert das Halten des Peak Flow Meters und das Ablesen der erreichten Werte. Er ist zugleich Teil der Schutzabdeckung.

Hauptmerkmale

- Ausklappbarer Griff
- Schutzabdeckung zur Aufbewahrung
- Display mit leicht ablesbarer Skala
- Integriertes, justierbares Dreizonen-Asthma-Management-System
- Universeller Funktionsbereich (60-800 l/min), geeignet für Erwachsene und Kinder

Therapiekontrolle leicht gemacht

Die farbkodierten Zeiger können vom medizinischen Fachpersonal so eingestellt werden, dass sie folgende Prozentsätze des für den Anwender persönlich besten Peak Flow darstellen:

- Grüne Zone 80 – 100% der persönlich besten Rate
- Gelbe Zone 50 – 80% der persönlich besten Rate
- Rote Zone 50% oder weniger der persönlich besten Rate

Dreizonen-Asthma-Management-System verhilft zu einem schnellen Ablesen des Peak Flows, und kann als Bestandteil eines Asthma-Aktionsplans den Patienten beim Umgang mit seinem Asthma unterstützen.

Vorteile PersonalBest

Entspricht internationalem Standard ISO 23747.

Die universelle Größe eignet sich für Erwachsene und Kinder.

Das ovale Mundstück ist für den Patienten angenehmer in der Anwendung.

Hochschlagfeste ABS-Kunststoffkonstruktion mit beweglichen Teilen aus rostfreiem chirurgischem Edelstahl

für zuverlässige Leistung.

Lebensdauer

Genauigkeit und Reproduzierbarkeit werden für ein Jahr garantiert.

Reinigung

Der PersonalBest lässt sich mit warmem Wasser und einer milden Flüssigseife oder auf der oberen Ablage des Geschirrspülers spülen und an der Luft trocknen. Auf keinen Fall auskochen oder mit Dampf reinigen.

Philips Respironics und PersonalBest sind Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V. sowie seiner Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.

Bitte besuchen Sie uns unter www.philips.de/respironics

© 2015 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern oder die Herstellung zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung oder Verpflichtung einzustellen.

Broudy AM 5/22/15 MCI 4106643 PN 1058810

Produktbeschreibung	Menge	Bestellnummer
PersonalBest Peak Flow Meter	1	1022973
Mundstück mit Einwegeventil	200	HS714-200
Mundstück für Kinder	100	HS715-100
Ovales Mundstück	100	HS757-100

Produktspezifikationen

Kalibrierung

Messbereich 60 – 800 l/min

Materialien

Gehäuse Schlagfester ABS-Kunststoff

Schutzabdeckung und Griff Polypropylen

Skala Warmgepresst, alkoholresistent

Technische Daten (der größere Wert gilt)

Genauigkeit* +/-10 % bzw. 10 l/min

Reproduzierbarkeit ≤ 5 % bzw. 10 l/min

Linearität ≤ 5 % bzw. 10 l/min

Fließwiderstand ≤ 0,35 kPa/l/min

Frequenzverhalten ≤ 12 % bzw. 15 l/min

Anzeigenauflösung 10 l/min von 60 – 700 l/min
20 l/min von 700 – 800 l/min

Hilfsmittelnummer 21.24.01.0016

* Unter folgenden Umweltbedingungen:

Umgebungstemperatur: 10°C – 35°C

Relative Luftfeuchtigkeit: 30% – 75%

Betriebshöhe: 0m – 1400m (Luftdruck: 1060 hPa – 850 hPa)



Philips Respironics Deutschland
+49 8152 93 06 0

Philips Respironics Schweiz
+41 6 27 45 17 50

Respironics Respiratory Drug Delivery (UK) Ltd
Chichester Business Park, City Fields Way
Tangmere, Chichester, PO20 2FT UK

www.philips.de/respironics