


Bedienungsanleitung

Wenn Sie möchten, dass Ihr R-Shield Sie vor Viren und Bakterien schützt, ziehen Sie diesen in einer sicheren Umgebung an.

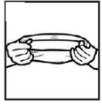

1. Rollen Sie den R-Shield auf



2. Ziehen sie ihn vorsichtig über Ihren Kopf



3. Richten Sie den R-Shield so aus, dass sich der Nanofaserfilter vor ihrem Mund befindet.



4. Ziehen Sie die Maske über Ihren Nasenrücken und pressen den verstellbaren Nasenbügel fest an den Nasensteg um Leckraten um die Nase zu vermeiden.



5. Verwenden Sie das elastische Gummiband mit der Schnurverriegelung am Hinterkopf um die Maske fest um Ihren Kopf zu fixieren.

Stellen Sie sicher, dass die Nanofasermembran ihre Nase und Ihren Mund bedeckt. Wenn Sie essen oder trinken möchten, ziehen sie ihr R-Shield unter ihr Kinn und belassen es um Ihren Hals. Stellen Sie sicher, dass die Nanofasermembran dabei auf der Innenseite des R-Shield verdeckt bleibt. Lassen Sie Ihr R-Shield nirgendwo liegen - auf diese Weise verhindern sie eine Kreuzkontamination.

Desinfizieren Sie Ihre Hände vor und nach dem Einstellen Ihres R-Shield mit einem Alkohol-haltigen antibakteriellen Gel.

Wenn Sie sich vor Viren und Bakterien schützen möchten, waschen Sie Ihr R-Shield nach jedem Gebrauch, wenn Sie aus einer Risiko-behafteten Umgebung zurückkommen.

So pflegen Sie ihr R-Shield:

1. Separat waschen. Waschen Sie Ihre R-Shield bei 30°C in einer "Handwäsche"-Einstellung und nur mit Waschpulver. Ausreichend Wasser wird Virenreste entfernen.
2. Verwenden Sie keinen Weichspüler, Bleichmittel oder aggressive Reinigungsmittel.
3. Nicht schleudern, nicht schrubben. Hängen Sie Ihr R-Shield 12-24 Stunden lang zum Trocknen auf.
4. Verwenden Sie keinen Wäschetrockner.

Sterilisieren Sie den R-Shield nicht mit Desinfektionsmittel (ausgenommen Ausnahmeliste, auf Anfrage erhältlich), Ozon oder einer UV-Lampe. Nicht in die Mikrowelle legen, nicht bügeln, dämpfen oder hohen Temperaturen aussetzen.

Die oben genannten Verfahren können den Nanofaserfilter dauerhaft beschädigen und seine Effizienz verringern.



LIFE'S WORTH IT

Vertrieb in Österreich

Ferdinand Menzl Medizintechnik GmbH
Portheimgasse 14, 1220 Wien

Tel: [+43 1 255 89 60 -0](tel:+43125589600)

Fax: [+43 1 255 89 60 - 60](tel:+431255896060)

info@menzl.com

www.menzl.com