


Gebrauchsanweisung

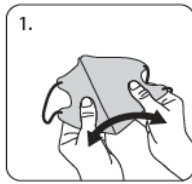


1. Öffnen Sie die Verpackung, entnehmen Sie die Halbmaske und entfalten Sie diese.



2. Platzieren Sie die Maske auf ihrem Nasenrücken und halten sie sie mit einer Hand fest.



3. Streifen Sie die Gummibänder mit ihrer anderen Hand hinter Ihre Ohren.

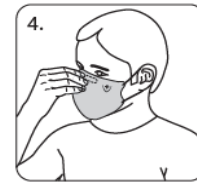

4. Pressen Sie den Bügel der Maske über Ihrem Nasensteg fest



5. Falls notwendig, ziehen Sie beide Gummibänder über die beigelegte Plastikklemme und befestigen sie an ihrem Hinterkopf.

Herstellerinformation:

RESPILON® RespiPro® White ist eine Anti-COVID-19-Schutzmaske. Die Filtrationseffizienz entspricht dem EU-Atemschutzstandard PPE-R/02.075 Version 2.

Verwendungsbestimmung ist für max. eine Arbeitsschicht (ca. 8 Stunden).

Haltbarkeit: 5 Jahre ab Herstellungsdatum auf der Verpackung.

Hauptzweck: Schutz der Atemwege vor Aerosolen, festen und flüssigen Partikeln.

Lagerung: In Originalverpackung aufbewahren und fernhalten von kontaminierten Bereichen, Staub, Sonnenlicht, extremen Temperaturen, übermäßiger Feuchtigkeit und schädlichen Chemikalien.

Lagerbedingungen: Temperatur von -10°C bis + 40°C, max. relative Luftfeuchtigkeit <80%.

Verwendung: 99,9% Viren, Bakterien, Smog, Allergene und Staub Filtrationseffizienz; Nicht in Umgebungen mit geringem Sauerstoff verwenden. Nicht in der Nähe von offenem Feuer verwenden.

Warnung: Verleihen Sie Ihre Atemschutzmaske nicht an Dritte. Bewahren Sie die Atemschutzmaske an einem kühlen und trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf. Für einen bestmöglichen Sitz der Maske verwenden Sie kein Make-up. Haare und / oder Gesichtshaare können die Haftung der Maske und damit die Schutzeigenschaften verringern. Nicht als Schutz vor Rauchgasen und Gase sowie flüchtigen Substanzen verwenden. Kinder dürfen die Schutzmaske nur unter Aufsicht ihrer Eltern Erziehungsberechtigten benutzen. Für Kinder unter 2,5 Jahren nicht empfohlen.

Die wiederholte Verwendung wird nur als Schutz vor Allergenen (Pollen, Staub usw.) und verschmutzter Luft empfohlen. Wenn Sie die Maske als Schutz vor Viren und Bakterien verwenden, nehmen Sie immer nach dem Tragen eine neue Maske aus der Originalverpackung (wenn die Masken nicht ordnungsgemäß in der Originalverpackung gelagert werden besteht Kontaminationsgefahr).

Verwenden Sie die Gesichtsmaske nicht, wenn Sie bei Ihnen Unwohlsein verursacht.

Vertrieb in Österreich

Ferdinand Menzl Medizintechnik GmbH
Portheimgasse 14, 1220 Wien

Tel: [+43 1 255 89 60 -0](tel:+43125589600)

Fax: [+43 1 255 89 60 - 60](tel:+431255896060)

info@menzl.com

www.menzl.com